

PRODUKTEÜBERSICHT 2024

BEINHALTER (FUSSSTÜTZE) FÜR DIE KNEECHIRURGIE

SWISS MADE  SINCE 2000



THE “MUST” FOR SURGERY OF THE KNEE JOINT

VORTEILE


- ✓ Ersetzt in Kombination mit einer lateralen Seitenstütze einen Assistenten
- ✓ Sechs verschiedene stabile Positionen
- ✓ Der Legholder bei Lieferung ist komplett zusammengebaut, einfache Montage mit Velcrogurten
- ✓ Keine Sterilisation erforderlich, kein Bedarf an zusätzlichen Verbrauchsmaterialien
- ✓ Röntgendurchlässig



Dies ist die beste Erfindung in der Orthopädie der letzten 20 Jahre.

**Dr.med. Alois Lustenberger, Orthopädischer Chirurg,
Gemeinschaftspraxis Orthomed, Schweiz**


PRODUKTE 2024

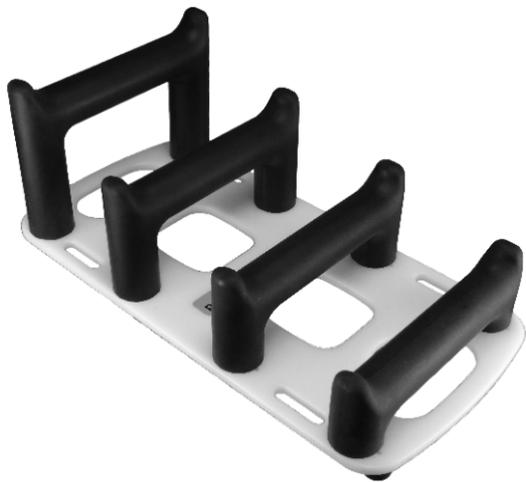

LegholderRX® standard

Der in der Vergangenheit meistverkaufte Beinhalter LegholderRX® standard, zeichnet sich in der neuen überarbeiteten Ausführung durch eine stabilere Konstruktion, optimierte Polsterung mit seitlichen Noppen.


Artikelnummer: LRX2020-02
GTIN Article: 7649994277024

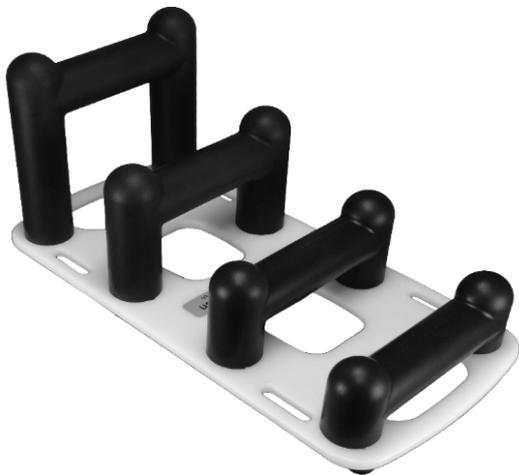

LegholderRX® fusion

Der neue LegholderRX® fusion hat halbkugelige Noppen seitlich an den Bügeln. Dies ermöglicht einerseits, dass das Tuch gut zwischen die Bügel hineingleiten und andererseits der Fuss nicht seitlich vom Bügel wegrutschen kann. Die Differenz der Bauhöhen zwischen den Bügeln ist leicht vergrößert, was eine bessere Stabilität gewährt.


Artikelnummer: LRX2024-03
GTIN Article: 7649994277055

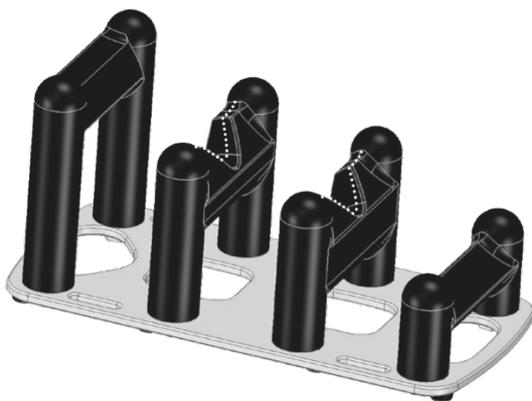

LegholderRX® extra stable

Sehr stabile Positionierung durch biometrisch berechnete und ergonomische Auflageflächen, vergrößerte Bauhöhe und Vertiefung für die Achillessehne beim 2. und 3. Bügel.

Artikelnummer: LRX2024-04
GTIN Article: 7649994277048

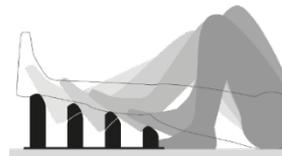

Die vergrößerte Bauhöhe kann durch Absenken des Beinteiles kompensiert werden.

*Jedes Produkt wird mit langen oder kurzen Velcrogurten geliefert.

OPERATIONEN, DEM LEGHOLDERRX® EINFACHER DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN



Der LegholderRX® erlaubt die intraoperative stabile Lagerung des Kniegelenks in **sechs verschiedenen Beugestellungen**. Mit den Velcrogurten kann der LegholderRX® einfach direkt am Operationstisch unter der sterilen Abdeckung befestigt werden.

Als Positionierungshilfe ist der Legholder kombiniert mit einer Seitenstütze am Oberschenkel sehr hilfreich bei **offenen Knieoperationen wie Arthroplastiken, Osteotomien, Knorpelrekonstruktionen und der Patellachirurgie**.

“ Die Modelle sind nicht kaputt zu kriegen ... Mir persönlich gefällt die extra stabile Version sehr gut. Sie bietet zusätzliche Stabilität, vor allem für grössere und schwerere Patienten. ”

Prof.Dr.med.Niklaus Friederich, Universitätsspital Basel



NEUE VERBESSERTE VELCROGURTE

Die Velcrogurte haben einen praktischen Verriegelungsstab sowie eine integrierte Zeichnung in der Zuglasche zur richtigen Anwendung.



KURZE VELCROGURTE

Der kurze Velcrogurt wird idealerweise verwendet, wenn der Legholder nur über die Beinauflage der Operationsseite befestigt werden kann. Dies ermöglicht die unabhängige Bewegung der Beinauflage der Operationsseite.



LANGE VELCROGURTE

Der lange Velcrogurt kann sowohl für die Befestigung über die halbe Beinauflage der Operationsseite als auch über die ganze Beinauflage verwendet werden.



TECHNISCHEN DATEN LEGHOLDER



Dimensionen

490 x 240 x 200mm

Gewicht

3 kg, einschliesslich zwei robuste Velcrogurte (lange oder kurze Version).

Spezifikationen


Pflegeleichte, robuste, nicht allergene Kunststoffteile, röntgendurchlässig.

Reinigung

Muss nicht sterilisiert werden, inert gegen übliche Reinigungsmittel.



legholder**rx**

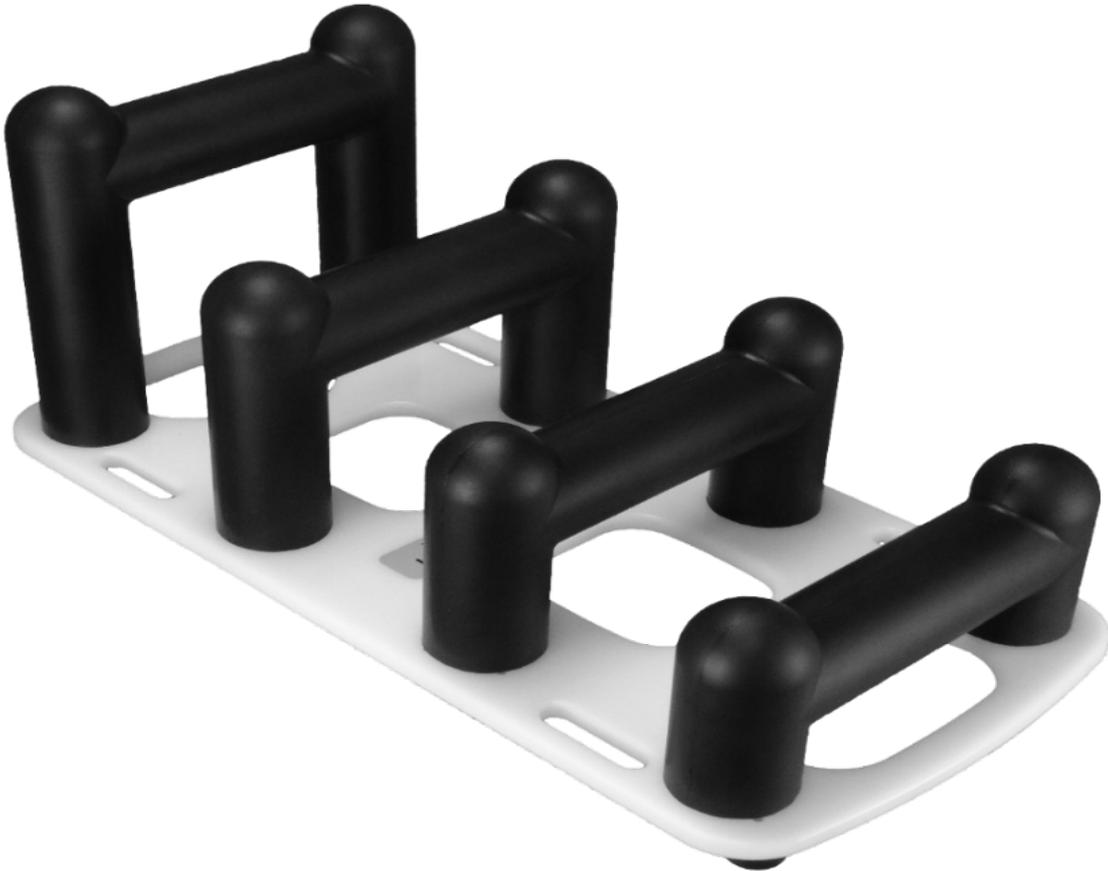

SWISS MADE  SINCE 2000

**Wirz Medical (Wirz Ortho Mechanics GmbH) | Bernstrasse 1 | CH-3076 Worb
T +41 31 832 43 53 | M +41 79 630 66 44 | F +41 31 832 43 54
mechanik@wirz-ortho.ch | legholder**rx**.ch**

Swissmedic N°: CH201505-0035 | GLN: 7649 9942 77000 | UID (MWST/EORI): CHE-480.499.766
Compliant to MDR 13/485 | Eudamed N°: APP000064674 | EU Representative: endocon.de | CE, ®, mod. dép.